



CZYSTOŚĆ I DEZYN



[DEZ-0131 VELOX SPRAY 1L TEATONIC DO DEZYNFEKЦИИ I MYCIA POWIERZCHNI - kup](#)

Płyn do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni w obszarze medycznym, domach opieki, sanatoriach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich, kosmetycznych, gabinetach masażu, przedszkolach, szkołach oraz do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością. Nadaje się do dezynfekcji powierzchni takich jak blaty, stoły, klamki, uchwyty oraz do sprzętu i akcesoriów fryzjerskich i kosmetycznych, a także nieinwazyjnego sprzętu medycznego jak np. fotele zabiegowe, aparatura medyczna, sprzęt rehabilitacyjny. Polecany jest również do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji oraz łyżek protetycznych i wycisków silikonowych. Produkt

posiada działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze wobec prątków gruźlicy i ograniczone wirusobójcze (wobec Rotawirusa, Norowirusa) oraz bójcze wobec wirusów osłonkowych (w tym COVID-19, Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV).

Sposób użycia: Spryskać preparatem powierzchnię z odległości około 30 cm dbając o całkowite jej pokrycie. Odczekać 30 sekund. W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością należy służyć je wodą pitną. Pozostałe powierzchnie nie wymagają słućania wodą.

Skład: 100g zawiera:
63,7 g etanol

6,3 g propan-2-ol

Opakowanie:

butelka 1L ze spryskiwaczem

Spektrum	Normy wg EN 14885	Obciążenie organiczne
		niskie
Bakterie (w tym MRSA)	EN 13727	30 sek.
Bakterie (w tym MRSA)	EN 16615	30 sek.
Grzyby (C. albicans)	EN 13624	15 sek.
Grzyby (C. albicans)	EN 16615	30 sek.
Prątki gruźlicy (M. terrae)	EN 14348	30 sek.
Wirusy otoczkowe (Vaccinia, Ebola, Herpes Simplex, HIV, HBV, HCV, Corona)	EN 14476	30 sek.
Wirusy BVDV	EN 14476	30 sek.
Wirus Rota	EN 14476	30 sek.
Wirus Noro	EN 14476	30 sek.
- Do dezynfekcji małych powierzchni sprzętu medycznego: łóżek i foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej, sprzętu rehabilitacyjnego - Działa już w 15 sek. na grzyby i 30 sek. na bakterie, prątki gruźlicy, wirusy (w tym Rota, Noro, Corona) - Polecany również do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji oraz łyżek protetycznych i wycisków silikonowych - Do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych mających kontakt z żywnością - Nie pozostawia smug i zacieków		
Rejestracja: wyrób medyczny i produkt biobójczy		
- Gwarancja skuteczności i bezpieczeństwo stosowania - Wysoka redukcja ryzyka zakażenia - Szybki efekt czystej i zdezynfekowanej powierzchni - Możliwość zastosowania do wielu powierzchni w obszarze medycznym i pozamedycznym		
•		

[VELOX SPRAY 1L NEUTRAL DO DEZYNFEKCJI I MYCIA POWIERZCHNI - kup](#)