



[DEZ-004 VELOX WIPES BOX 100SZT ALKOHOŁOWE CHUSTECZKI DEZYNFEKCYJNE - OPAKOWANIE PUSZKA / BOX - kup](#)

Zastosowanie: Velox Wipes zalecane są do mycia i szybkiej dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych: łóżek i foteli zabiegowych, aparatury medycznej. Polecane jest również do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji oraz łyżek protetycznych i wycisków silikonowych. Preparat nie zawiera aldehydu i fenolu dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Dzięki innowacyjnej formule opartej na synergii surfaktantów i technologii nano-miceli produkt posiada szerokie spektrum bójcze i wyjątkowe właściwości myjące. Posiadają pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed. Posiadają przyjemny świeży zapach.

Skuteczność mikrobiologiczna: Szczegółowe informacje są zawarte w ulotce produktowej w załączniku

Skład:

100 g zawiera:

40g - propan-2-ol (CAS:67-63-0)

20g - etanol

0,39g – aminy, n-C10-16-alkiltrimetylenodi-, produkty reakcji z kwasem chlorooctowym

0,25g – chlorek didecylodimetyloamoniowy

Opakowanie:

Puszka 100 sztuk

Rozmiar chusteczki 13 x 20 cm.

- Zalecane do unitów, aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, końcówek stomatologicznych, lamp zabiegowych, łóżek pacjentów
- Do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością
- Nie zawierają aldehydu i fenolu, dzięki czemu nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni
- Wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS i materiały obciowe – opinia Famed
- Działają już od 30 sek. na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy otoczkowe (w tym Corona), Adeno, Rota
- Chusteczki włókninowe 13×20 cm, 23 g/m2

Sposób użycia:

Chusteczkę wyjąć z opakowania i przetrzeć nią powierzchnię. Dokładnie zamknąć wieczko puszek. Po otwarciu opakowanie zużyć w ciągu 21 dni. Nie używać jeśli chusteczka jest sucha. Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholi (np. szkło akrylowe). Produkt przeznaczony do użycia przez profesjonalnego użytkownika.

Spektrum	Normy wg EN 14885	Obciążenie organiczne	
		niskie	wysokie
Bakterie (w tym MRSA)	EN 1276	30 sek.	60 sek.
	EN 13697	30 sek.	60 sek.
	EN 13727	30 sek.	
	EN 16615	30 sek.	30 sek.
	EN 1650	30 sek.	60 sek.
Grzyby (C. albicans)	EN 13624	30 sek.	
	EN 16615	30 sek.	30 sek.
	EN 14348	30 sek.	60 sek.
	DVV/RKI	30 sek.	30 sek.
	EN 14476	30 sek.	
Prątki gruźlicy (M. terrae)	EN 14476	60 sek.	
Wirus otoczkowe (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Ebola, wirus grypy A, B, C, Herpes simplex, Corona)			
Wirus Rota			
Wirus Adeno			