



[DEZ-016 VELOX WIPES NA 100SZT BOX BEZALKOHOŁOWE CHUSTECZKI DEZYNFEKCYJNE - PUSZKA PLASTIKOWA - kup](#)

Velox® Wipes NA są zalecane specjalnie do dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Mogą być stosowane na oddziale intensywnej opieki medycznej oraz bloku operacyjnym, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp zabiegowych. Nie zawierają aldehydów i fosforanów, dzięki czemu nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Posiadają przyjemny zapach.

Skład: 100 sztuk zawiera:

173 g - roztworu nasączonego.

100 g roztworu zawiera:

0,15 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina

0,14g - Poli(oksy-1,2-etanodilo), alfa-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydrokso-,propanian(sól)

Opakowanie:

puszka 100 szt.

Sposób użycia: Wkład umieścić w puszcze. Chusteczkę wyjąć z opakowania i przetrzeć nią dezynfekowaną powierzchnię. Dokładnie zamknąć wieczko puszek. Po otwarciu opakowanie zużyć w ciągu 30 dni. Nie używać jeśli chusteczka jest sucha. Powierzchnia nie wymaga splukania wodą. W przypadku powierzchni szczególnie wrażliwych zaleca się test w niewidocznym miejscu. Produkt przeznaczony do użycia przez profesjonalnego użytkownika.

- Gotowe do użycia, do powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu
- Zalecane do lamp i głowic USG
- Przeznaczone do dezynfekcji różnorodnych powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego, foteli zabiegowych, sprzętu rehabilitacyjnego, inkubatorów
- Działają już od 1 min. na bakterie, grzyby, wirusy (w tym Corona)
- Prątki gruźlicy już w 5 min.
- Chusteczki włókninowe 13×20 cm, 23 g/m³

Spektrum	Normy wg	Obciążenie organiczne	
		niskie	wysokie
Bakterie (w tym MRSA)	EN 14885		
	EN 13727	60 sek.	60 sek.
	EN 16615	60 sek.	60 sek.
Grzyby (C. albicans)	EN 13624	60 sek.	60 sek.
	EN 16615	60 sek.	60 sek.
Prątki gruźlicy (M. terrae)	EN 14348	5 min.	10 min.
Wirus otoczkowe (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola, Corona)	EN 14476	60 sek.	60 sek.