



DEZ-0161 VELOX WIPES NA ZAPAS 100SZT BEZALKOHOLOWE CHUSTECZKI DO DEZYNFEKCI

Velox® Wipes NA są zalecane specjalnie do dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Mogą być stosowane na oddziale intensywnej opieki medycznej oraz bloku operacyjnym, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp zabiegowych. Nie zawierają aldehydów i fosforanów, dzięki czemu nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Posiadają przyjemny zapach. Mogą być stosowane do powierzchni wyrobów medycznych mających kontakt z żywnością. Produkt posiada pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed.

Sposób użycia: Wkład umieścić w puszcze. Chusteczkę wyjąć z opakowania i przetrzeć nią dezynfekowaną powierzchnię. Dokładnie zamknąć wieczko puszek. Po otwarciu opakowanie zużyć w ciągu 30 dni. Nie używać jeśli chusteczka jest sucha. Powierzchnia nie wymaga splukania wodą. W przypadku powierzchni szczególnie wrażliwych zaleca się test w niewidocznym miejscu. Produkt przeznaczony do użycia przez profesjonalnego użytkownika.

Skład: 100 sztuk zawiera:
173 g roztworu nasączonego

Skład: 100 g roztworu zawiera:
0,15 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, 0,14 g Poli(oksy-1,2-etanodilo), alfa-[2-(didecyl(metyloamino)etylo)-omega-
-hydroksy-,propanian(sól)]

Spektrum	Normy wg	Warunki
	EN 14885	czyste
Bakterie (w tym MRSA)	EN 13727	60 sek.
	EN 16615	60 sek.
Grzyby (<i>C. albicans</i>)	EN 13624	60 sek.
	EN 16615	60 sek.
Prątki gruźlicy (<i>M. terrae</i>)	EN 14348	5min.
Wirus otoczkowe (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccina, BVDV, SARS-Cov-2, Herpes simplex)	EN 14476	60 sek.

Działają już od 1 min. na bakterie, grzyby, wirusy

Prątki gruźlicy już w 5 min

Zalecane do lamp i głowic USG

Przeznaczone do dezynfekcji różnorodnych powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego, foteli zabiegowych, sprzętu rehabilitacyjnego, inkubatorów

Chusteczki włókninowe 13x20 cm, 23 g/m

Gwarancja skuteczności i bezpieczeństwa stosowania

Wysoka redukcja ryzyka zakażenia

Szybki efekt czystej i zdezynfekowanej powierzchni

Możliwość zastosowania do wielu wrażliwych materiałów

Gotowe do użycia, do powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu

Dają efekt odświeżenia

Ekonomiczne w użyciu